



PLATNÁ VERZE:

4

Typ závěru Vacutainer	Materiál ke zpracování	Specifikace zkumavky	Oddělení - stanovení	Poznámka	
<b>ŽLUTÝ</b>	krevní sérum	gel + aktivátor srážení	virologie	1 x 5 ml	<i>doba srážení krve ve svislé poloze minimálně 15 min</i>
<b>ČERVENÝ</b>	krevní sérum	aktivátor srážení CAT	virologie, chladové aglutininy	1 x 6 ml	po odběru ihned promíchat jemným převrácením 5 – 6x o 180° tam a zpět
<b>FIALOVÝ</b>	plná krev	EDTA	imuno hematologie	1 x 6 ml	promíchání vzorku 8 – 10x o 180°
			imuno hematologie novorozence	1 x 6 ml / 1 x 2 ml (pupečnicková/venózní krev)	
			genotypizace RBC antigenů	1 x 6 ml	promíchání vzorku 8 – 10x o 180° vzorek nemůže být zároveň použit pro jiná vyšetření